

## メディカル機器シリーズ

# 血液用冷蔵庫

医療機器

製造販売認証番号

FMB-121G 230AGBZX00033000

FMB-181G 230AGBZX00034000

FMB-301G 230AGBZX00032000

※特定保守管理医療機器(クラスII)に該当します。



横幅50センチで省スペース設置可能。

新たなラインナップを追加しモデルチェンジ。

### 充実した警報機能

温度異常(高温・低温)

発報までの温度・時間を設定可能。

設定温度 4℃±2℃、遅延0(約20秒)~99分

(初期設定 4℃±2℃、遅延 高温警報 10分 低温警報 30分)

ドア開放異常

90秒までは10秒単位で、

それ以降は30秒単位で

設定可能


(初期設定 30秒)

操作パネル▶



### 機能的な測定孔

挿入されるケーブルや電線の形状を選びません。  
(特許取得)

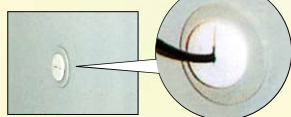

### サーモレコーダー標準装備



庫内温度の履歴を自動記録  
できます。  
(記録紙1年分(12コ)付)

### キャスター付

設置、移動に便利な4輪

自在キャスター付



### 鍵付

施錠装置付きで  
安心管理。



### 年間ランニングコスト比較

■180Lタイプ



FMB-180G

FMB-181G

■300Lタイプ



FMB-300G

FMB-301G

※年間消費電力量は、周囲温度30℃、湿度60%、電源周波数60Hz、電源電圧100V、設定温度5℃、無負荷、扉開閉無しの条件で得られた値を表示しております。

### 収納バスケット(オプション)

血液バッグの収納が容易になります。

(収納バスケットは製品内に1段2個、FMB-121Gは6個、181G/301Gは10個収納可能。)

#### ●FMB-121G/181G用


血液バッグ400mlを最大4個収納。

外形寸法:W162.5×D266×H123mm

内形寸法:W150.5×D254×H117mm

標準価格:3,300円

※写真は  
FMB-301G用

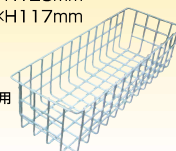

#### ●FMB-301G用

血液バッグ400mlを最大7個収納。

外形寸法:W162.5×D466×H123mm

内形寸法:W150.5×D454×H117mm

標準価格:3,700円

※血液バッグのサイズにより収容数は異なります。



## FMB-121G

外形寸法:W500×D450(548)×H1,430mm  
内形寸法:W420×D285×H897mm

標準価格:495,000円(税抜)

単相100V 有効内容積 121L 温度 4℃固定

※血液バッグのサイズによって、収容数は異なります。



## FMB-181G

外形寸法:W500×D450(548)×H1,870mm  
内形寸法:W420×D285×H1,347mm

標準価格:605,000円(税抜)

単相100V 有効内容積 179L 温度 4℃固定



## FMB-301G


外形寸法:W500×D650(748)×H1,870mm  
内形寸法:W420×D485×H1,347mm

標準価格:737,000円(税抜)


単相100V 有効内容積 303L 温度 4℃固定

# 血液用冷蔵庫

## FMB-121G

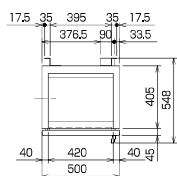


→ 吸込  
→ 吹出

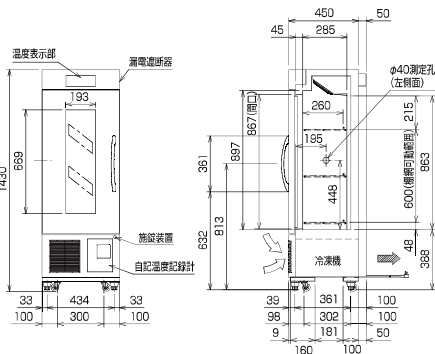


製造販売認証番号 230AGBZX00033000

## FMB-181G

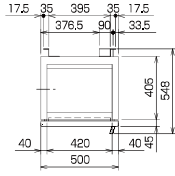


→ 吸込  
→ 吹出

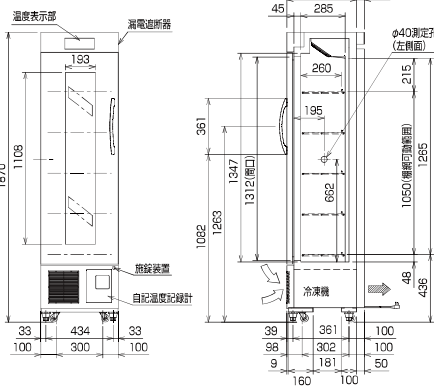


製造販売認証番号 230AGBZX00034000

## FMB-301G

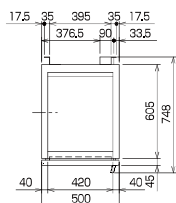


→ 吸込  
→ 吹出

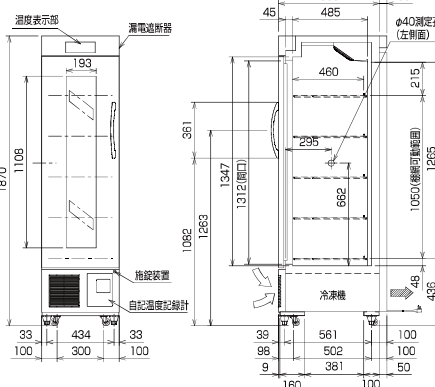

製造販売認証番号 230AGBZX00032000


| 機種名               | FMB-121G                                                                                         | FMB-181G          | FMB-301G          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 寸法                |                                                                                                  |                   |                   |
| 外形(mm) (幅×奥行×高さ)  | 500×450(548)×1430                                                                                | 500×450(548)×1870 | 500×650(748)×1870 |
| 内形(mm) (幅×奥行×高さ)  | 420×285×897                                                                                      | 420×285×1347      | 420×485×1347      |
| 有効内容積(ℓ)          | 121                                                                                              | 179               | 303               |
| 製品質量(kg)          | 66                                                                                               | 77                | 90                |
| 材質                |                                                                                                  |                   |                   |
| 外装                | 塗装鋼板                                                                                             |                   |                   |
| 内装                | ステンレス鋼板                                                                                          |                   |                   |
| 扉                 | 表面: 塗装鋼板<br>裏面: 塗装鋼板<br>特殊二重ガラス マグネット式1枚                                                         |                   |                   |
| 断熱材               | 硬質発泡ポリウレタン一体発泡                                                                                   |                   |                   |
| 冷却性能(無負荷、周囲温度30℃) | 2~6℃ (4℃固定)                                                                                      |                   |                   |
| 冷却装置              |                                                                                                  |                   |                   |
| 圧縮機公称出力           | 75W                                                                                              |                   |                   |
| 冷媒制御方式            | キャピラリーチューブ                                                                                       |                   |                   |
| 凝縮器               | ワイヤーチューブ型                                                                                        |                   |                   |
| 冷却器               | 強制通風式フィンチューブ型                                                                                    |                   |                   |
| 冷媒                | R-134a                                                                                           |                   |                   |
| 温度制御              | マイコン制御 デジタル温度表示                                                                                  |                   |                   |
| 霜取方式              | 自動検知式サイクルデフロスト                                                                                   |                   |                   |
| 電源                |                                                                                                  |                   |                   |
| 適用ブレーカー容量         | 単相100V 15A 50/60Hz                                                                               |                   |                   |
| 適用コンセント形式         | 接地2P 15A 125V                                                                                    |                   |                   |
| 許容電圧範囲(V)         | 90~110                                                                                           |                   |                   |
| 電気特性              |                                                                                                  |                   |                   |
| 冷却時 (50/60Hz)     | 運転電流(A)                                                                                          | 1.3/1.4           | 1.4/1.5           |
|                   | 始動電流(A)                                                                                          | 12/12             | 12/12             |
|                   | 消費電力(W)                                                                                          | 127/137           | 132/142           |
|                   | 力率(%)                                                                                            | 97/98             | 94/95             |
| 加温時 (50/60Hz)     | 運転電流(A)                                                                                          | 1.2/1.2           | 1.2/1.2           |
|                   | 消費電力(W)                                                                                          | 115/115           | 122/122           |
| 使用周囲温度            | -5~35℃ 80%RH以下                                                                                   |                   |                   |
| キャスター             | 4輪 (自在)                                                                                          |                   |                   |
| 付属品               | 棚網3枚(FMB-121G)・5枚(FMB-181G・FMB-301G)、<br>鍵、転倒防止金具(床用)×2セット、<br>アンカーボルト(M10)×2個、ボード用アンカー×4個(ビス付き) |                   |                   |

### 棚網寸法(mm)

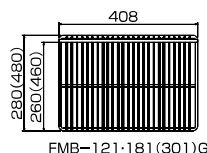

### ■電源コンセント形状

●接地形2極15A125V

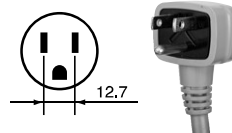

### 集中管理システム

トリプルエス

# SSSマスター

集中管理システム



- 複数機器の温湿度等の集中管理を実現。
- 計測データはすべて自動で記録・保管。
- 異常発生時には、E-mailやFAXなどにてすぐに通報。
- ユーザー管理、電子署名、監査証跡などにより、電子データの信頼性を確保。(FDA 21CFR Part.11準拠)

### バリデーションサービス

|     |                 |
|-----|-----------------|
| 測定点 | お客様のご要望により、別途打合 |
| 料金  | お客様のご要望により、別途見積 |

## 支店・営業所は全国に71カ所 Fukushimaのサービスネットワーク

万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。  
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。

# GALILEI

Be cool, Be alive.

フクシマガリレイ株式会社



安全に関するご注意

- このリーフレットに掲載の製品は屋内用です。雨水のかからないところでご使用、保管下さい。
- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

このリーフレットに掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。

- 仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 本リーフレットに収録したものは、すべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

|                 |               |                      |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 本社・FMS 事業部 (大阪) | (06)6477-2121 | 大阪府大阪市西淀川区竹島 2-6-18  |
| FMS 事業部 (東京)    | (03)6361-1956 | 東京都台東区柳橋 2-17-4      |
| FMS 事業部 (札幌)    | (011)833-1211 | 北海道札幌市白石区中央三条 1-1-15 |
| FMS 事業部 (仙台)    | (022)259-1671 | 宮城県仙台市宮城野区中野 1-5-4   |
| FMS 事業部 (名古屋)   | (052)559-2940 | 愛知県名古屋市中区金山 5-13-24  |
| FMS 事業部 (中四国)   | (086)245-0551 | 岡山県岡山市北区中仙道 1-1-11   |
| FMS 事業部 (福岡)    | (092)474-5881 | 福岡県福岡市博多区博多駅南 6-2-27 |

カタログ・仕様図のダウンロードができます

URL <https://www.galilei.co.jp>

フクシマ製品についてのお問い合わせ、ご注文は

|                                                                                     |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ISO 9001:2008<br>認証取得<br>滋賀工場・岡山工場<br>関西技術部・S B 事業部<br>東京技術部・東京工事業部<br>中部技術部・西日本技術部 | ISO 14001:2004<br>認証取得<br>本社・東京<br>名古屋・福岡<br>滋賀工場・岡山工場 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|



本リーフレットの記載内容は  
2022年4月現在のものです。  
(2204-00)G→O

MD-2204-B